

IV 安装说明

1



b + **c**

将防溢出膜装到防溢出阀上，使隔膜完全平整的贴合在阀上。

2



将组装好的防溢出阀和膜推进吸乳护罩中，确保防溢出阀的位置如图所示的方向。

3



将奶瓶旋入吸乳护罩。

4




橡胶密封圈套在活塞杆上——较大的一边面对把手一侧。为确保密封，抓紧橡胶密封圈转动活塞手柄。

IV 安装说明

5




将真空调节器环套在抽气筒上。

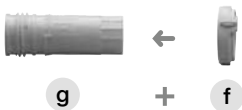

6



将活塞送入抽气筒中。

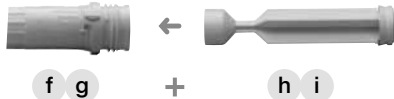

7



将马达上的圆筒旋入吸乳护罩。

