

VII 自由模式吸乳

安装自由模式吸乳配件



请将自由模式固定带 (j1) 与自由模式固定带接口连接 (j2)。



用力将自由模式固定带连接扣 (j1/j2) 连接到每个吸乳护罩的背面。



解开文胸搭扣，将肩带上端接头插入文胸的搭扣。

如需要，可使用搭扣转接头。

将吸乳护罩中央对准乳头位置。



将底部扣夹牢牢装至胸罩带。请确保哺乳胸罩悬垂未留在吸乳罩底下。



如有需要，将扣夹移至背带的其它位置，以调整松紧度。



将肩带上端活动的一头往下拉，以调节肩带长度。



连接导管。



可以自由模式自动吸乳了。

使用腰带，增加使用灵活性



将腰带围在腰上，搭扣面向外。
如果需要长一些的吊带，可以使用延长配件。



将吸乳器的夹子推入腰带的嵌孔中。

VIII 记忆功能



一旦你找到对你来说舒适并有效的吸乳方式，可以用飞韵Freestyle轻易的将个人的方式记录编程，无需每次重新设置。

设置记忆功能可帮您实现重复：

- 刺激阶段的时间
- 刺激阶段压力水平
- 吸乳阶段压力水平

存储你需要的设置：

- 按照说明书上的步骤VI开始吸乳。
- 在吸乳模式时，记忆键长按三秒钟，直到显示闪烁，吸乳器响3声提示。
- 像往常一样结束吸乳。

激活你所要的设置：

- 启动吸乳器并按记忆键。

计时器

当打开吸乳器时，计时功能自动开启。

如因任何原因，想要在某个吸乳阶段重启计时器，长按吸乳模式键三秒钟。这样即可重启计时器，但飞韵Freestyle仍然会继续吸乳。