



一旦你找到对你来说舒适并有效的吸乳方式，可以用飞韵Freestyle轻易的将个人的方式记录编程，无需每次重新设置。

设置记忆功能可帮您实现重复：

- 刺激阶段的时间
- 刺激阶段压力水平
- 吸乳阶段压力水平

存储你需要的设置：

- 按照说明书上的步骤VI开始吸乳。
- 在吸乳模式时，记忆键长按三秒钟，直到显示闪烁，吸乳器响3声提示。
- 像往常一样结束吸乳。

激活你所要的设置：

- 启动吸乳器并按记忆键。

计时器

当打开吸乳器时，计时功能自动开启。

如因任何原因，想要在某个吸乳阶段重启计时器，长按吸乳模式键三秒钟。这样即可重启计时器，但飞韵Freestyle仍然会继续吸乳。