


- 不要在户外使用。
- 保持干燥，不要直接放在阳光下曝晒。
- 不要将产品打湿。
- 不要在洗澡或冲淋时使用。
- 不要将马达组件放入或掉入水或其他液体里。
- 不要将液体直接喷在或倒在气泵上。
- 不要将产品放在容易掉入浴缸和水槽的地方。
- 如果任何电气装置掉入水中，不要用手够触。请立即拔下电源。
- 只使用美德乐 Medela 原装配件。
- 检查气泵组件是否有磨损或损坏。
- 此款产品为个人使用而设计。多人使用可能会对健康造成威胁，并且会影响质保有效性。
- 当马达正确放置时再开始使用气泵。
- 睡眠或欲入睡时不要使用。
- 产品若放置在儿童可触及的范围内，需要大人的看管。
- 若出现问题或疼痛，请咨询您的哺乳期顾问或医生。
- 在可燃性麻醉剂与空气，氧气或氮氧化物混合的场合下不适合使用该产品。
- 手机或无线电频率的通讯设备的使用可能会对请只使用丝韵 Swing 吸乳器的使用产生影响。
- 丝韵 Swing 吸乳器需要采取与 EMC（电磁兼容性）相关的特殊预防措施，并需要按照使用说明中的 EMC 相关信息来安装和使用。
- 丝韵 Swing 产品内不带有用户可维修的配件。请不要尝试自己修理丝韵 Swing 吸乳器。

请妥善保存本使用说明书


IV 安装说明

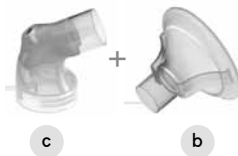

确认吸乳护罩与连接器安装牢固。



将防溢出膜装到防溢出阀上，直至隔膜完全平整地贴在阀上。

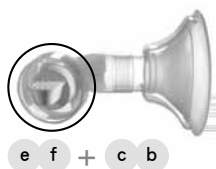

将安装好防溢出膜的防溢出阀插到连接器上。请确认防溢出阀的开口如图所示朝向一边。

IV 安装说明




将奶瓶与连接器旋紧。



将软管的适配器末端插入连接器开口。




将软管的另外一端插入多边形端口。

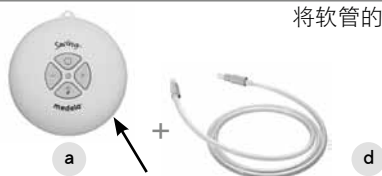

V 操作

控制按钮与 LED

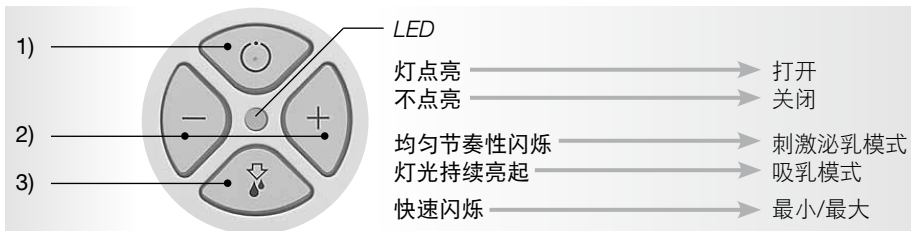

- 1) 开/关按钮
- 2) 增加真空按钮 (+)
减少真空按钮 (-)
- 3) 下泄按钮

注意

如果吸乳器在没有操作（如调整真空值）的情况下工作 30 分钟，丝韵 Swing 将自动断电。