

按照清洁说明操作，除非你的专业健康顾问有其他建议。

重要事项

- 在以下描述的所有清洁步骤中使用饮用水。
- 使用后立即清洁，以避免有乳汁的残留和细菌的孳生。
- 在清洁前将所有部件拆分。尤其注意将黄色的防溢出阀从吸乳护罩上卸下，并将阀上白色的防溢出膜揭下。

在首次使用及以后每次使用前

- 拆分，洗涤并冲洗所有与接触的吸乳器部件 (b+c+e+f+g+k+l+m)。
- 将部件放入足够大的深锅中。
- 注入冷水直至淹没所有的部件。您也可以加入一勺柠檬酸以防止水垢的生成。
- 加热煮沸后再煮 5 分钟。
- 将锅拿开，倒掉开水。
- 用干毛巾擦干部件。

或者，拆分开的部件可以在洗碗机的顶层中清洁或者进行蒸汽消毒。

注意：食物颜色可能改变部件的颜色，但不影响性能。

每次使用完毕后

- 拆开所有与乳房和乳汁有接触的部件后，用温和肥皂水手洗 (b+c+e+f+g+k+l+m)。
- 用干净的水冲洗。
- 用干毛巾擦干部件。
- 使用后用微潮的布(不是湿布)擦拭马达。

软管的保护

在每次吸乳后，检察软管。

是否有水汽出现在软管中

在吸乳结束后，在软管仍连接时，继续抽气 1 至 2 分钟直到软管中变干燥。

如果有乳汁进入软管

如果有乳汁意外进入软管，关掉气泵并拔掉电源。按照说明移开并清洁软管“在使用前及每次使用前”。将水滴晃出后，悬挂风干。要快速风干的话，将软管与气泵相接并开动气泵 1 至 2 分钟或直到干燥。

提示

暂不使用部件时，将部件清洁后放在一个干净的可密封的口袋中或是贮藏在一个盛满液体的容器中。部件也可用干净的纸或毛巾包好。

卫生

- 在触碰乳房和吸乳器的部件前，用水和肥皂彻底清洗手。
- 避免接触奶瓶和盖子的内侧。
- 用湿布擦拭乳房和周围皮肤。
- 不要使用肥皂或酒精擦拭，以免造成皮肤干燥，使乳头破损。